



Gebrauchsanweisung

# EyeMedica® EUPHRASIA AUGENTROST Augen-Tropfen Medizinprodukt

## BESCHREIBUNG

**EyeMedica® Euphrasia Augentrost Augen-Tropfen** sind die sanfte Lösung zur Linderung gereizter Augen. Sie enthalten den natürlichen Extrakt aus der Wiesenblume Euphrasia, im Volksmund auch bekannt als „Augentrost“. Die traditionsreiche Substanz regt die Selbstregulationskräfte im Auge an und wirkt beruhigend.

**EyeMedica® Euphrasia Augentrost Augen-Tropfen** sind frei von Konservierungsstoffen und für Kontaktlinsenträger geeignet. Durch die Bildung eines viskoelastischen, klaren Schutzfilms auf der Hornhaut schützen **EyeMedica® Euphrasia Augentrost Augen-Tropfen** die Augenoberfläche und machen sie gleitfähig. Das enthaltene Natriumhyaluronat befeuchtet intensiv gereizte und trockene Augen. Die hygienischen Ein-Dosis-Behältnisse sind ideal für unterwegs.

Dadurch bewirken sie eine lang anhaltende und natürliche Linderung bei Beschwerden in Zusammenhang mit:

- mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge.
- Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch.
- Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.


Außerdem eignen sie sich zur Anwendung bei saisonalen und ganzjährigen Allergien.

## ANWENDUNG

Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist (1). Zum Öffnen drehen (nicht ziehen) Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (2). Halten Sie das Ein-Dosis-Behältnis mit der Tropföffnung nach unten und geben Sie je nach Bedarf ein bis zwei Tropfen in jedes Auge (3).

Da das Produkt keine Konservierungsmittel enthält, sollten Sie es nach dem Öffnen umgehend aufbrauchen.

Die Kontaktlinsen sollten vor der Anwendung herausgenommen werden und erst 15 Minuten nach der Anwendung wieder eingesetzt werden. Wenn Sie anhaltende Beschwerden haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Augenarzt.

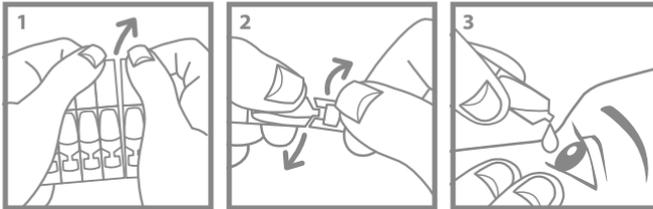

## ZUSAMMENSETZUNG

Natriumhyaluronat, Carbomer, Euphrasia Tincture, Mannitol, Wasser für Injektionszwecke

## PACKUNGSGRÖSSE

Verkaufseinheit: 10 x 0,4 ml Ein-Dosis Behältnisse

## VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.
- Das Auge nicht mit dem Ein-Dosis-Behältnis berühren.
- Aufgrund des Kontaminationsrisikos ist jeglicher Kontakt mit der Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses zu vermeiden.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da **EyeMedica® Euphrasia Augentrost Augen-Tropfen** keine Konservierungsmittel enthalten, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Nicht gleichzeitig zusammen mit Augenarzneimitteln verwenden.
- Nicht an infizierten oder verletzten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wiederhergestellt ist.
- Verwenden Sie **EyeMedica® Euphrasia Augentrost Augen-Tropfen** nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses ist auf jedem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

## LAGERUNG

Bei 2°C bis 25°C lagern. Vor Frost schützen. Vor Licht geschützt im Originalkarton aufbewahren. Chargennummer und Verfallsdatum sind auf dem Ein-Dosis-Behältnis und der Faltschachtel-Unterseite aufgedruckt.



## BEDEUTUNG DER SYMBOLE AUF DER PACKUNG



Hersteller



Bitte Gebrauchsinformation beachten



Temperaturbegrenzung



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



Nicht wiederverwenden



Aseptische Herstellung



Chargencode



Verwendbar bis

**Stand der Information:** April 2020



**Hersteller:**

Dr. Kleine Pharma GmbH  
Heidsieker Heide 114  
D-33739 Bielefeld, Germany



**Vertrieb:**

DISTRICON GmbH  
Am Joseph 15  
D-61273 Wehrheim, Germany

267.1\_REV04 / G01